

PRODUKTINFORMATION

TELEFON-ADAPTER



BESCHREIBUNG

Der Telefon-Adapter ist eine kabellose Bluetooth®-Schnittstelle zwischen konventionellen Festnetztelefonen und dem Bernafon SoundGate. Der Nutzer erhält ein einzigartiges Klangerlebnis und kann bestehende Telefone einfach mit dem SoundGate verbinden und somit die Hörsysteme wie eine Freisprecheinrichtung verwenden. Die Kombination mit weiteren, bereits mit dem SoundGate gekoppelten Geräten, wie Mobiltelefon oder MP3-Player etc., ist völlig problemlos.

EINFACHE KOMMUNIKATION

Der Telefon-Adapter ermöglicht es dem Nutzer, via SoundGate über den Festnetzanschluss zu telefonieren. Der Telefon-Adapter arbeitet mit einer modernen Störgeräusch- und Echounterdrückung, die es Ihrem Kunden ermöglicht, Gesprächen klar und störungsfrei zu folgen.

INSTALLATION

Die Installation des Telefon-Adapters ist kinderleicht. Er wird einfach zwischen Anschlussdose und bestehendem Telefon (oder Basisstation) angeschlossen.

EINFACHE BEDIENUNG

Sobald der Telefon-Adapter einmal mit dem SoundGate gekoppelt wurde, ist das Gerät sofort betriebsbereit, wenn es sich innerhalb der SoundGate Reichweite (ca. 10 m) befindet. Eingehende Anrufe werden durch Drücken der Telefontaste auf dem SoundGate angenommen. Anrufe werden wie gewohnt über das Telefon getätigt, während das SoundGate getragen wird.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	83 x 86 x 23 mm [3 1/4" x 3 3/8" x 7/8"]
Gewicht	80 g [2.8 oz.]
Spannungsversorgung	Netzteil, 5V DC
Stromverbrauch	100 mA max.
Telefoneingänge	Telefoneingang / -ausgang: 2 x RJ11
PSTN Versionen	FW 100-1 (US) / FW 100-2 (Europe) / FW 100-3 (Pacific) / FW 100-4 (Japan)
Bluetooth®-Bestimmung	Ver. 2.0
Bluetooth®-unterstütztes Profil	Headset Profil (HSP) 1.0
Übertragungsfrequenz	2.4 GHz (ISM Band)
Auto Connect Reichweite	10 m [30 ft.]
Audioqualität	Mono / 20 kHz Samplingrate
Audiobandbreite	80 Hz – 3.5 kHz
Statusleuchten	Dauerhaft leuchtend: Bei Verbindung mit dem SoundGate Langsam blinkend: Während der Suche nach dem SoundGate Schnell blinkend: Telefonübertragung läuft
Farbe	Weiss, hochglanz
Strahlung	Max. -15dB/µA /10 m, entspricht allen relevanten Standards
Betriebstemperatur	0 – 50° C [32–122° F]
Lagertemperatur	-20 – 70° C [-4–158° F]

OASIS ANPASSOFTWARE UND TELEFON-ADAPTER

Alle SoundGate kompatiblen Bernafon Hörsysteme verfügen über ein spezielles Programm für SoundGate Unterhaltungsanwendungen. Dieses Programm kann in Oasis individuell benutzerfreundlich feinangepasst werden.

Der Pegel der Hörsystemmikrofone (z.B. zur Wahrnehmung der Hörumgebung) kann über die Oasis

Software im Verhältnis zum Telefonton herauf oder herab gesetzt werden. Sie finden diese Funktion unter "Zusatzfunktionen" im SoundGate Telefonprogramm. Das ausgewählte SoundGate Telefonprogramm wird dann automatisch aktiviert, sobald die Telefonübertragung über das SoundGate läuft.

Vertrieb:

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Schweiz
Telefon +41 31 998 15 15
Telefax +41 31 998 15 90
www.bernafon.com

Bernafon Hörgeräte GmbH
Nunsdorfer Ring 14
12277 Berlin
Deutschland
Telefon +49 30 723937-0
Telefax +49 30 723937-19
www.bernafon.de